



医疗器械召回事件报告表

(公司内部召回编号: FMI 34136)

提交: 企业所在地省级药品监督管理部门

器械注册/备案部门

产品名称	麻醉系统	注册证或备案凭证编码	国械注进 20153543672 国食药监械(进)字 2011 第 3543717 号
生产企业名称	Datex-Ohmeda, Inc.		
代理人名称	通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司		
召回单位负责人和联系方式, 经办人和联系方式	负责人: 李延 010-57388736 经办人: 彭一苇 010-57388736		
产品的适用范围	见 附表 1. 产品信息		
涉及地区和国家	中国、美国、欧盟等国家和地区	召回级别	二级
涉及产品生产(或进口中国)批次、数量	1949 件	涉及产品型号、规格	Aespire View
识别信息(如批号)	见 附表 2 识别信息	涉及产品在中国的销售数量	1949 件
召回原因简述	<p>注: 本报告针对新增麻醉系统型号 Aespire View, 其他 Aespire/Avance/Aisys 产品系列相关内容请参考“沪药监械主召 2024-179”中的报告。</p> <p>GE 医疗近期发现, 如果患者呼吸回路被用户错误地连接到辅助共用气体出口(ACGO)端口, 可能会出现潜在问题。用户选定 ACGO 后, 它将为连接到 ACGO 端口的辅助手动呼吸系统(例如, Mapleson-D 回路)提供新鲜气流。如果患者呼吸回路的呼气管被错误地连接到 ACGO 端口而非高级呼吸系统(ABS)端口, 则可能导致呼吸系统内压力过高。上述可能受到影响的麻醉设备可提供多种警报, 在呼吸系统压力增加时向临床医生发出警报。在极少数情况下, 如果医护人员没有注意到患者呼吸回路的呼气管与 ACGO 端口的错误连接, 呼吸系统压力的增加可能会导致患者受伤。</p> <p>GE 医疗中国未收到与该问题相关的国内市场反馈、国内投诉和不良事件相关信息。维护高标准的安全和质量是我们的首要任务, GE 医疗决定通过此次主动召回, 派工程师至客户现场确认以及为客户提供更新的文本资料(可发)的包含 ACGO 端口和开关的保护盖套件。</p>		



纠正行动简述(包括召回要求和处理方式等)	<ol style="list-style-type: none">1. GE 医疗将通知客户此问题和注意事项;2. GE 医疗将派工程师至客户现场确认以及为客户提供更新的文本资料和可安装的套件 (如需要), 套件中包含 ACGO 端口和开关的保护盖。 <p>注: 本次纠正行动不涉及受影响产品的停用及退回。</p>
----------------------	---

报告单位: (盖章)

报告人:



负责人:

报告日期:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李" (Li) followed by a stylized mark.

2024.10.29

附表 1 产品信息

产品名称	型号	医疗器械注册证号	生产企业名称	产品适用范围
麻醉系统	Aespire View	国械注进 20153543672	Datex-Ohmeda, Inc.	用于患者提供常规的吸入麻醉和呼吸支持。设备用于容积或压力控制呼吸。该设备并不适用于 MRI 环境中。
		国食药监械(进)字 2011 第 3543717 号		用于患者提供常规的吸入麻醉和呼吸支持。设备用于容积或压力控制呼吸。该设备并不适用于 MRI 环境中。

附表 2 识别信息-新增 Aespire View 麻醉系统部分

APHS00684	APHW00327	APHS01219	APHX00145	APHV01281	APHW00230	APHU01358	APHW00649	APHT00339	APHW00691
APHV00564	APHW00328	APHS01220	APHX00107	APHV01283	APHW00233	APHU01360	APHW00653	APHU00174	APHV00631
APHV00356	APHW00329	APHW00484	APHX00108	APHV01284	APHW00349	APHY00203	APHV00868	APHV00373	APHU01244
APHW00357	APHW00157	APHX00268	APHX00112	APHV01286	APHW00377	APHY00204	APHV00565	APHU01033	APHU01245
APHV00240	APHV00798	APHW00585	APHX00115	APHV01287	APHY00192	APHY00213	APHU00938	APHX00271	APHV01524
APHW00241	APHV00804	APHY00300	APHV00310	APHV01288	APHV00810	APHU01002	APHU00939	APHX00273	APHV01526
APHT00737	APHX00224	APHY00268	APHV00311	APHW00481	APHV00811	APHV00283	APHS00811	APHX00274	APHW00490
APHX00285	APHY00250	APHY00294	APHT00749	APHW00486	APHV00812	APHV01515	APHW00657	APHX00280	APHW00491
APHX00295	APHY00251	APHU01310	APHW00372	APHW00487	APHV00813	APHW00427	APHW00659	APHS00122	APHW00492
APHV01557	APHS00702	APHU01311	APHW00373	APHW00972	APHV00814	APHW00470	APHV00795	APHS00132	APHV00884
APHV00842	APHV01395	APHV00901	APHW00374	APHW00975	APHV00815	APHU01371	APHV00909	APHX00416	APHW00238
APHV00439	APHV01507	APHW00222	APHW00375	APHW00977	APHV00816	APHU01308	APHV01323	APHW00818	APHX00160
APHX00129	APHV01508	APHY00137	APHX00370	APHW00978	APHV00817	APHU01309	APHV01324	APHW00819	APHV00694
APHX00130	APHV01496	APHY00138	APHX00371	APHX00289	APHV00819	APHS01470	APHV01325	APHW00992	APHW00482
APHX00131	APHW00933	APHW00210	APHV01517	APHX00302	APHV00820	APHT02320	APHX00667	APHV00354	APHV00301
APHX00132	APHW00934	APHW00530	APHU01034	APHV00634	APHV00821	APHV00772	APHX00668	APHV00355	APHT02788
APHX00616	APHS00721	APHX00139	APHV00312	APHV01394	APHV00822	APHV00775	APHX00669	APHW00644	APHT02824
APHY00283	APHX00234	APHY00178	APHV00315	APHV01364	APHV00876	APHV01493	APHX00216	APHX00144	APHU00619
APHR01260	APHX00235	APHX00663	APHV00323	APHW01041	APHX00561	APHW00448	APHX00222	APHX00150	APHU00620
APHU00265	APHX00236	APHX00664	APHV01156	APHW01046	APHX00562	APHX00602	APHV00278	APHW00607	APHY00202
APHU00266	APHX00237	APHX00665	APHT02787	APHR01578	APHX00563	APHY00194	APHV00907	APHW00608	APHY00205
APHV01407	APHX00238	APHV00700	APHT00267	APHR01579	APHX00564	APHX00217	APHX00284	APHW00609	APHY00209
APHW00506	APHX00239	APHX00469	APHW00348	APHX00654	APHX00565	APHV00681	APHW00693	APHW00611	APHY00212
APHW00426	APHS00119	APHX00582	APHV00261	APHU00654	APHX00566	APHV00686	APHW00248	APHW00612	APHX00275
APHW01001	APHS00120	APHY00237	APHW01084	APHX00538	APHX00567	APHV01177	APHW00514	APHW00613	APHS01234
APHW01002	APHS00121	APHY00238	APHW01085	APHX00539	APHY00191	APHV01179	APHW00515	APHW00614	APHT02279
APHW01003	APHV00256	APHV01554	APHW01086	APHY00312	APHY00278	APHV01295	APHW00516	APHU00823	APHU00324
APHW01004	APHY00140	APHS01650	APHW01087	APHY00220	APHY00289	APHV00358	APHW00517	APHU00824	APHU00325
APHW01005	APHY00143	APHW00250	APHW01088	APHX00527	APHW00322	APHV00318	APHW00518	APHU00825	APHU00326
APHW01006	APHW00273	APHX00675	APHT00835	APHX00528	APHW00321	APHV00324	APHW00519	APHU00826	APHU00327
APHW01007	APHV01326	APHX00530	APHT00836	APHW00980	APHX00560	APHV00328	APHW00520	APHU00827	APHU01210
APHW01008	APHV01327	APHY00133	APHU01197	APHW00981	APHX00221	APHV01416	APHW00521	APHU00828	APHW00315
APHW01009	APHV01328	APHY00134	APHY00103	APHW00982	APHT02348	APHX00159	APHW00522	APHU00829	APHW00316
APHW01010	APHV01329	APHU01304	APHY00105	APHW00983	APHT02349	APHX00161	APHW00523	APHU00830	APHW00319



APHV01011	APHV01330	APHU01305	APHY00106	APHW00984	APHX00466	APHX00162	APHW00524	APHU00831	APHX00717
APHW01012	APHV01331	APHU01306	APHY00107	APHW00985	APHV00773	APHX00163	APHW00525	APHU00832	APHV00647
APHW01013	APHW00469	APHU01307	APHY00108	APHX00499	APHV01385	APHX00164	APHW00526	APHU00871	APHY00246
APHW01014	APHW00485	APHW00947	APHY00109	APHX00501	APHV01386	APHY00114	APHW00527	APHU00872	APHW00674
APHW01025	APHW00460	APHW00948	APHY00110	APHX00503	APHV01389	APHV00753	APHW00528	APHU00873	APHW00677
APHW01026	APHW00462	APHW00949	APHY00111	APHX00507	APHV01390	APHV00757	APHW00529	APHU00874	APHW00678
APHW01027	APHW00480	APHW00950	APHY00112	APHR01263	APHV01391	APHV00758	APHW00531	APHU00875	APHW00680
APHW01028	APHX00101	APHV00297	APHY00113	APHY00183	APHU00910	APHY00288	APHW00532	APHU00876	APHW00681
APHW01028	APHT02954	APHV00841	APHY00116	APHY00186	APHX00591	APHU01372	APHW00533	APHU00877	APHW00326
APHW01029	APHT00815	APHV01037	APHY00118	APHT02710	APHV00455	APHU01232	APHW00534	APHV01265	APHW00239
APHW01030	APHU01004	APHV01038	APHV00774	APHU00165	APHV00636	APHV01215	APHW00535	APHV01266	APHV00465
APHW01031	APHV01495	APHV01264	APHV01164	APHU00165	APHV00637	APHS01408	APHW00536	APHV01541	APHV00890
APHW01032	APHX00278	APHX00233	APHV01167	APHU00611	APHV00638	APHS01409	APHW00537	APHV01542	APHW00953
APHW01033	APHW00838	APHW00242	APHV01492	APHW00351	APHV00639	APHS01410	APHW00538	APHV01543	APHW00954
APHW01034	APHW00841	APHW00243	APHV00540	APHW00379	APHV00640	APHS01411	APHX00614	APHV01544	APHW00955
APHW01035	APHY00254	APHW00244	APHS01516	APHX00598	APHV00641	APHU00114	APHX00619	APHV01545	APHW00956
APHW01051	APHY00258	APHW00245	APHS01517	APHX00601	APHV00642	APHT02850	APHY00147	APHV01546	APHW00957
APHW01052	APHY00127	APHU00650	APHV00341	APHT02797	APHV00643	APHX00103	APHY00148	APHV01547	APHW00958
APHW01053	APHV00801	APHU00651	APHV00715	APHT02798	APHV00644	APHV01027	APHY00149	APHV01548	APHW00959
APHW01054	APHW00389	APHV01051	APHV01387	APHX00276	APHV00645	APHV01028	APHY00151	APHV01549	APHW00960
APHW01055	APHW00393	APHV01052	APHV01388	APHY00313	APHX00381	APHW00552	APHY00152	APHV01550	APHW00961
APHW01056	APHW00461	APHX00186	APHV01396	APHY00314	APHX00382	APHW00553	APHY00153	APHW00736	APHW00962
APHW01057	APHW00474	APHX00240	APHV01399	APHW00268	APHX00383	APHW00554	APHY00154	APHW00737	APHW00963
APHW01058	APHW00869	APHX00241	APHV01510	APHW00269	APHX00552	APHW00555	APHY00155	APHW00738	APHW00964
APHW01059	APHV00808	APHU01303	APHW00606	APHV01104	APHX00553	APHW00556	APHY00156	APHW00739	APHT02779
APHW01060	APHV00809	APHW00500	APHY00132	APHX00417	APHX00604	APHW00557	APHY00157	APHW00740	APHV01260
APHW01061	APHY00276	APHX00135	APHY00135	APHX00418	APHU00822	APHW00558	APHY00158	APHW00741	APHV01261
APHW01062	APHY00281	APHR01607	APHX00690	APHV01168	APHW00317	APHW00559	APHY00160	APHW00742	APHV01262
APHW01063	APHY00285	APHR01608	APHV01513	APHV00450	APHS00919	APHW00354	APHY00161	APHW00743	APHV01263
APHW01064	APHV00765	APHU00194	APHX00287	APHW00676	APHX00300	APHW00641	APHY00162	APHW00744	APHV01143
APHW01065	APHV00911	APHU00242	APHX00293	APHY00260	APHV00269	APHW00642	APHY00163	APHW00745	APHW00624
APHW01066	APHV01525	APHW00943	APHX00267	APHV01522	APHV00271	APHX00412	APHY00164	APHW00746	APHW00625
APHW01067	APHW00385	APHW00944	APHY00291	APHV01523	APHW00221	APHX00413	APHY00165	APHW00747	APHW00626
APHW01068	APHW00391	APHW00489	APHV01045	APHY00252	APHW00227	APHX00414	APHY00166	APHW00748	APHV00628
APHW01069	APHW00459	APHV01518	APHV01046	APHT02803	APHW00229	APHY00176	APHY00167	APHW00749	APHV01427
APHW01070	APHW00836	APHV00769	APHV01047	APHY00102	APHW00387	APHW00617	APHY00218	APHW00750	APHV00877



APHW01071	APHV00448	APHX00693	APHY00297	APHY00117	APHW00388	APHW01091	APHY00219	APHW00751	APHV00887
APHW01071	APHW01036	APHX00694	APHV00463	APHW00827	APHW00458	APHW01092	APHY00275	APHW00752	APHX00467
APHW01073	APHV00535	APHU01319	APHX00105	APHV01417	APHW00476	APHW01093	APHY00293	APHW00753	APHX00415
APHW01071	APHV00464	APHX00203	APHX00269	APHV01017	APHW00479	APHW00888	APHU00931	APHW00754	APHX00200
APHW01075	APHV00467	APHX00204	APHX00615	APHV00361	APHX00347	APHW00889	APHW00694	APHW00755	APHX00201
APHR01226	APHV00468	APHX00205	APHX00423	APHV00805	APHX00348	APHR01646	APHX00290	APHW00756	APHX00202
APHT02219	APHY00221	APHX00206	APHV00880	APHW00509	APHX00349	APHV01239	APHX00476	APHW00757	APHW00494
APHT02220	APHY00222	APHX00207	APHV00888	APHR01752	APHX00350	APHW00467	APHX00477	APHW00758	APHW00610
APHT02221	APHY00223	APHX00225	APHV00440	APHY00266	APHV00276	APHV00659	APHV01063	APHW00759	APHW00652
APHV00459	APHY00224	APHX00226	APHW00545	APHV01392	APHX00142	APHV00660	APHV01064	APHW00760	APHY00101
APHV00460	APHY00225	APHX00227	APHU01361	APHU01275	APHY00193	APHT00139	APHV01065	APHX00478	APHW00497
APHV00466	APHY00230	APHX00228	APHX00557	APHV01105	APHW00871	APHW00551	APHV01066	APHX00479	APHW00503
APHU01362	APHY00231	APHV01055	APHV01234	APHS01545	APHW00872	APHV00334	APHV01067	APHX00480	APHW00502
APHU01367	APHY00233	APHV01056	APHV01236	APHV00333	APHX00622	APHV01402	APHV01068	APHX00481	APHU01229
APHV01290	APHY00234	APHX00670	APHX00210	APHV01384	APHW00483	APHV01410	APHV01304	APHX00482	APHU01230
APHV00364	APHW00320	APHW00246	APHV00298	APHW00699	APHV00337	APHU00480	APHV01308	APHX00483	APHV00776
APHV00365	APHX00613	APHW00247	APHW00968	APHT00413	APHV00783	APHV01049	APHV01309	APHX00484	APHW00566
APHW00501	APHW00700	APHS01553	APHW00970	APHX00568	APHV00784	APHT02242	APHV01310	APHX00485	APHS01235
APHU01224	APHV00976	APHS01554	APHV00684	APHX00569	APHV00785	APHV00878	APHV01311	APHX00486	APHS01236
APHX00104	APHU01227	APHS01555	APHW00966	APHX00570	APHV00786	APHU01218	APHV01312	APHX00487	APHS01638
APHX00109	APHV00372	APHU00960	APHV00277	APHY00265	APHV00787	APHV01172	APHV01313	APHX00488	APHS01639
APHU01001	APHX00625	APHV01053	APHV00902	APHV01048	APHX00352	APHV01285	APHV01314	APHX00489	APHU01032
APHV00362	APHX00626	APHV01054	APHV00682	APHV01099	APHX00353	APHV01292	APHV01315	APHX00490	APHU01209
APHV00610	APHX00637	APHS00705	APHV00683	APHV00696	APHX00354	APHT00256	APHV01316	APHX00491	APHU01211
APHV01494	APHX00638	APHW00926	APHW00344	APHV00698	APHX00355	APHT00257	APHV01317	APHX00492	APHU01213
APHR01732	APHX00644	APHW00927	APHW00967	APHV00699	APHX00357	APHT00258	APHV01318	APHX00493	APHU01216
APHV00650	APHX00645	APHW00928	APHW00976	APHV00763	APHX00358	APHT00259	APHV01319	APHX00494	APHU01217
APHV00651	APHX00689	APHW00929	APHX00149	APHV00767	APHX00359	APHT00260	APHX00265	APHX00495	APHU01220
APHU01005	APHV00441	APHW00930	APHX00356	APHV00770	APHX00451	APHT00261	APHX00369	APHX00496	APHU01237
APHU01006	APHV00456	APHV00738	APHX00680	APHY00267	APHX00452	APHV01423	APHX00327	APHX00497	APHU01369
APHU01322	APHW00732	APHY00240	APHR00719	APHV00274	APHW00493	APHV01425	APHV01393	APHV00905	APHU00819
APHU01323	APHW00646	APHY00241	APHW00237	APHY00277	APHW00496	APHU00999	APHV01398	APHV00267	APHV01059
APHU01324	APHW00655	APHV00743	APHW00707	APHX00600	APHW00499	APHX00677	APHW00226	APHV00272	APHW00601
APHU01325	APHX00195	APHV00744	APHW00647	APHU00164	APHX00384	APHX00678	APHW00228	APHV01491	APHW00629
APHW00241	APHV00800	APHX00391	APHW00965	APHU00164	APHX00385	APHX00679	APHW00495	APHY00198	APHX00133
APHV00904	APHV00794	APHU01312	APHW00973	APHU00911	APHX00386	APHU01370	APHW00498	APHV00685	APHV00273



APHV00518	APHV00796	APHU01234	APHX00148	APHU01366	APHX00387	APHU00113	APHX00374	APHV00687	APHV00279
APHV00682	APHX00152	APHY00232	APHX00465	APHU01368	APHX00388	APHW00478	APHX00375	APHV01485	APHV00280
APHX00558	APHU00115	APHV00745	APHX00212	APHV00619	APHX00389	APHX00153	APHX00376	APHV01486	APHV00281
APHX00559	APHU00116	APHV00746	APHX00214	APHV00622	APHX00390	APHU01090	APHX00377	APHX00266	APHV00321
APHU00124	APHU00118	APHV00747	APHX00215	APHV00625	APHW00951	APHX00698	APHX00378	APHX00270	APHV01509
APHV00342	APHU00909	APHV00750	APHV01520	APHV00629	APHW00952	APHX00699	APHX00379	APHY00269	APHV01511
APHV00451	APHU01359	APHV00756	APHU01228	APHV00635	APHV00363	APHX00700	APHX00380	APHY00271	APHW00324
APHV00454	APHW00172	APHY00190	APHU01231	APHV01237	APHV01514	APHX00701	APHX00453	APHR01406	APHW00703
APHV00620	APHW00195	APHY00228	APHX00589	APHV01238	APHU01364	APHX00702	APHX00454	APHX00316	APHW00704
APHT02410	APHW00197	APHY00229	APHY00274	APHV01240	APHY00315	APHX00703	APHX00455	APHT02350	APHW00705
APHT02411	APHW00477	APHY00280	APHX00592	APHW00546	APHY00319	APHX00704	APHX00456	APHT02351	APHW00706
APHX00686	APHV01551	APHY00282	APHS01666	APHW00887	APHV00275	APHU01212	APHX00457	APHV00712	APHW00932
APHV00764	APHY00159	APHY00286	APHU00609	APHX00282	APHU00522	APHU01221	APHX00458	APHX00263	APHX00623
APHW00931	APHV01421	APHY00317	APHV01159	APHX00603	APHU00523	APHU01235	APHX00459	APHX00264	APHX00529
APHT00722	APHV01433	APHY00318	APHV01165	APHX00315	APHX00232	APHU01236	APHX00460	APHV00543	APHV00259
APHT00723	APHV01084	APHY00320	APHV01170	APHV00329	APHT02417	APHW00935	APHX00461	APHU00208	APHS01527
APHU00613	APHV01085	APHY00321	APHV01171	APHW00830	APHT00494	APHW00936	APHX00462	APHU00209	APHX00286
APHW00673	APHV01086	APHW00330	APHX00596	APHW00733	APHU00653	APHW00937	APHX00463	APHW00463	APHX00291
APHU00614	APHY00279	APHW00333	APHV00865	APHY00235	APHT00646	APHW00938	APHX00464	APHV01040	APHX00319
APHU00615	APHY00284	APHW00334	APHY00292	APHY00236	APHW00605	APHW00939	APHU00633	APHV01041	APHX00321
APHU00616	APHV00352	APHX00253	APHV00326	APHV00336	APHX00594	APHY00208	APHY00290	APHV01042	APHX00324
APHU00617	APHV00353	APHX00254	APHV01289	APHW00350	APHU00920	APHV00799	APHW00600	APHV01043	APHX00328
APHU00618	APHS00936	APHX00255	APHV01293	APHW00353	APHW00176	APHW00264	APHW00602	APHV01452	APHX00632
APHW00345	APHS00937	APHX00256	APHV01406	APHS01512	APHX00141	APHW00265	APHT02852	APHV01453	APHW00180
APHW00352	APHT00831	APHW00731	APHW00232	APHX00110	APHX00143	APHW00266	APHY00168	APHV01454	APHW00182
APHV01436	APHT00832	APHY00323	APHX00345	APHX00288	APHW00310	APHW00267	APHY00169	APHV01455	APHW00184
APHV01437	APHT02849	APHX00346	APHV00296	APHX00292	APHY00316	APHW00271	APHY00170	APHY00298	APHW00185
APHV01438	APHU01314	APHX00642	APHV01366	APHX00294	APHW00446	APHX00245	APHY00171	APHY00302	APHW00186
APHV01439	APHU01315	APHY00273	APHW00504	APHX00311	APHW00447	APHX00246	APHY00172	APHY00303	APHW00188
APHV01440	APHU01316	APHS01246	APHW00505	APHX00313	APHX00303	APHX00247	APHY00173	APHY00306	APHW00189
APHV01441	APHU01317	APHS01247	APHU01302	APHX00314	APHX00325	APHX00248	APHY00174	APHY00308	APHW00190
APHS01612	APHU01318	APHS01248	APHV00461	APHX00320	APHW00734	APHX00249	APHV00993	APHY00309	APHW00192
APHS01613	APHT00350	APHS00237	APHW00449	APHX00322	APHY00211	APHX00185	APHT02830	APHY00310	APHW00194
APHS01614	APHW00413	APHT02642	APHW00450	APHX00323	APHY00214	APHX00306	APHT02831	APHY00311	APHW00158
APHS01615	APHV00761	APHV00284	APHW00451	APHX00326	APHW00224	APHX00307	APHT02832	APHV00322	APHW00159
APHS01616	APHV00762	APHV00285	APHW00452	APHX00366	APHW00225	APHX00309	APHT02833	APHW00839	APHX00277



APHS01617	APHW00769	APHV00881	APHU01214	APHX00367	APHW00428	APHX00310	APHT02834	APHW00840	APHV00708
APHS01618	APHU00726	APHW00177	APHU01215	APHX00368	APHW00429	APHX00312	APHT02835	APHR01168	APHX00114
APHS01619	APHX00470	APHW00735	APHU01219	APHX00399	APHW00430	APHT02403	APHT02836	APHT02825	APHW00654
APHS01620	APHX00471	APHY00226	APHU01223	APHX00400	APHW00431	APHT02404	APHT02837	APHV01180	APHX00279
APHS01621	APHX00472	APHY00227	APHU01233	APHX00401	APHW00432	APHX00199	APHT02838	APHV01181	APHX00102
APHV00654	APHX00473	APHY00322	APHU01377	APHX00402	APHW00433	APHV01442	APHT02839	APHV01241	APHX00308
APHT02385	APHX00474	APHX00146	APHV01428	APHX00403	APHY00206	APHV01443	APHT02840	APHW00193	APHU01365
APHT02386	APHX00475	APHV01403	APHW00881	APHX00404	APHY00210	APHX00394	APHT02841	APHW00231	
APHT02387	APHV01552	APHW00438	APHW00882	APHX00405	APHV01332	APHX00395	APHU00110	APHV01282	
APHW00925	APHV01356	APHW00439	APHW00883	APHX00406	APHV01333	APHX00396	APHU01363	APHV01363	
APHW00832	APHV01357	APHY00299	APHW00884	APHX00407	APHT02702	APHX00397	APHX00425	APHX00111	
APHW00835	APHW00279	APHY00295	APHW00885	APHX00408	APHV00929	APHX00398	APHX00426	APHT00823	
APHW00940	APHW00280	APHY00296	APHW00886	APHX00409	APHV00930	APHS00808	APHX00429	APHX00518	
APHV01235	APHS00691	APHV01435	APHW00941	APHX00410	APHV00931	APHU00946	APHU00515	APHX00523	
APHV01003	APHV01447	APHR01713	APHW00942	APHW00873	APHV00932	APHW00234	APHW00543	APHX00524	
APHV00282	APHV01448	APHR01714	APHW00945	APHX00134	APHV00933	APHW00235	APHW00544	APHS01189	
APHV01484	APHV01449	APHR01715	APHW00946	APHV00330	APHV00934	APHW00236	APHV00257	APHY00131	
APHV00286	APHV01451	APHR01716	APHX00662	APHV00360	APHV00935	APHU00652	APHV00258	APHS00429	
APHV00287	APHW00791	APHW00376	APHX00671	APHW00645	APHV00936	APHV00910	APHV00260	APHS01291	
APHV00288	APHV01559	APHU00599	APHX00511	APHV00446	APHV00937	APHV00914	APHX00392	APHS01292	
APHT00455	APHU01291	APHV01411	APHX00512	APHV00452	APHV00938	APHV00299	APHX00393	APHT00736	
APHT00456	APHW00507	APHW00651	APHX00514	APHV00453	APHV00939	APHV00300	APHX00548	APHU00142	
APHT00457	APHW00508	APHX00427	APHX00515	APHV00617	APHV00940	APHW00643	APHX00549	APHU00143	
APHW00240	APHV00697	APHW00687	APHW00314	APHV00618	APHV00941	APHW00648	APHU01225	APHU00144	
APHR01247	APHV01519	APHX00424	APHX00509	APHV00621	APHV00942	APHW00656	APHU01226	APHU00145	
APHR01267	APHU00259	APHV01397	APHX00510	APHV00623	APHX00696	APHW00661	APHW00175	APHW00874	
APHX00672	APHU00260	APHW00974	APHX00517	APHV00624	APHX00697	APHW00831	APHW00196	APHW00875	
APHV00633	APHV00748	APHW00979	APHX00520	APHW00220	APHW00488	APHW00837	APHX00519	APHW00876	
APHV00332	APHW00100	APHV00885	APHX00521	APHW00274	APHX00344	APHV01233	APHX00525	APHW00877	
APHW00547	APHW00922	APHW00842	APHX00243	APHW00171	APHX00219	APHT02795	APHX00526	APHW00878	
APHW00223	APHW00923	APHV01162	APHX00244	APHW00173	APHW00332	APHT02796	APHY00142	APHW00879	
APHU01379	APHW00924	APHV01174	APHW01043	APHW00174	APHT00779	APHU00947	APHY00144	APHW00880	
APHV00818	APHT02406	APHX00617	APHW01044	APHX00624	APHW00270	APHU00948	APHR01249	APHV00771	
APHW00378	APHX00360	APHW00183	APHW01045	APHX00630	APHV01302	APHU00949	APHV00646	APHV00908	
APHW00390	APHX00361	APHW00662	APHR01700	APHX00633	APHV01303	APHU00950	APHV01012	APHR01068	
APHW00475	APHX00362	APHV00802	APHS01204	APHT00353	APHV00689	APHV01057	APHS01208	APHR01069	

/

APHW00712	APHX00363	APHX00151	APHW00325	APHV00649	APHV00718	APHV01058	APHS01209	APHV00316
APHW00713	APHW00998	APHV00990	APHW00331	APHU00957	APHR01726	APHW00717	APHS01210	APHV00294
APHW00714	APHS01111	APHV01175	APHW00619	APHU00958	APHV01271	APHY00242	APHS01211	APHV00314
APHW00715	APHS01112	APHU00272	APHW00620	APHV00652	APHV01272	APHY00243	APHS01212	APHV00319
APHW00716	APHW01037	APHU00273	APHW00621	APHW00253	APHX00351	APHY00244	APHS01213	APHV00711
APHV01365	APHW01038	APHV00438	APHW00622	APHW00914	APHV01558	APHV01445	APHS01332	APHV00716
APHV00308	APHW01039	APHT02882	APHW00623	APHW00915	APHX00573	APHV01446	APHT00826	APHV00717
APHV00309	APHW01040	APHT02883	APHY00197	APHW00916	APHX00574	APHV00627	APHT00827	APHV00693
APHV00344	APHX00634	APHT02884	APHX00209	APHW00917	APHX00651	APHV01157	APHU00612	APHV00710
APHV00719	APHX00317	APHT02885	APHX00211	APHW00918	APHX00661	APHT02800	APHT00825	APHY00256
APHW00616	APHX00318	APHT02886	APHX00676	APHW00920	APHY00119	APHU00937	APHS00213	APHV01169
APHV00766	APHU00484	APHT02887	APHV00338	APHW00921	APHY00120	APHT02418	APHV01512	APHV00339
APHU01009	APHU00485	APHT02888	APHV00713	APHX00136	APHY00121	APHU00936	APHV01521	APHX00554
APHS00807	APHU00486	APHT02889	APHV00714	APHX00137	APHY00122	APHV01163	APHW00896	APHX00555
APHX00646	APHU00487	APHT02890	APHU01238	APHR01679	APHY00123	APHV00883	APHW00897	APHV00882
APHX00682	APHV01334	APHT02891	APHU00579	APHT00837	APHY00124	APHV00889	APHX00140	APHU01000
APHV00295	APHV01335	APHU00728	APHV01033	APHX00296	APHY00125	APHW00567	APHX00576	APHV00879
APHV00445	APHV01336	APHY00180	APHW00468	APHX00299	APHY00126	APHV00793	APHX00577	APHV00313
APHW00594	APHX00556	APHT02725	APHV00749	APHX00304	APHY00259	APHX00147	APHX00650	APHV00317
APHW00181	APHU00590	APHV00759	APHV00754	APHX00305	APHX00272	APHV01160	APHX00655	APHV00325
APHW00187	APHU00591	APHY00199	APHV00755	APHX00197	APHX00620	APHV01400	APHX00656	APHV00327
APHW00191	APHS01218	APHU00959	APHV01161	APHW00346	APHX00628	APHV01414	APHT00338	APHV00181

